



NOVUS™

Maschera nasale per CPAP



Homecare ▪ Novus maschera nasale per CPAP




Novus™ maschera nasale per CPAP

La maschera nasale per CPAP è un'interfaccia leggera e confortevole destinata all'impiego su pazienti adulti (>30kg) a cui è stata prescritta una terapia CPAP o bilevel domiciliare.


Progettata per offrire una soluzione ben tollerata e di facile impiego per i pazienti domiciliari. La maschera Novus è costituita da pochi componenti, che ne rendono l'utilizzo semplice e consentono facili operazioni di montaggio e smontaggio per la pulizia, anche in contesto domestico.

Novus è disponibile in due misure, con un morbido cuscino in silicone, offrendo la massima confortevolezza di utilizzo, adatto per la maggior parte dei pazienti.

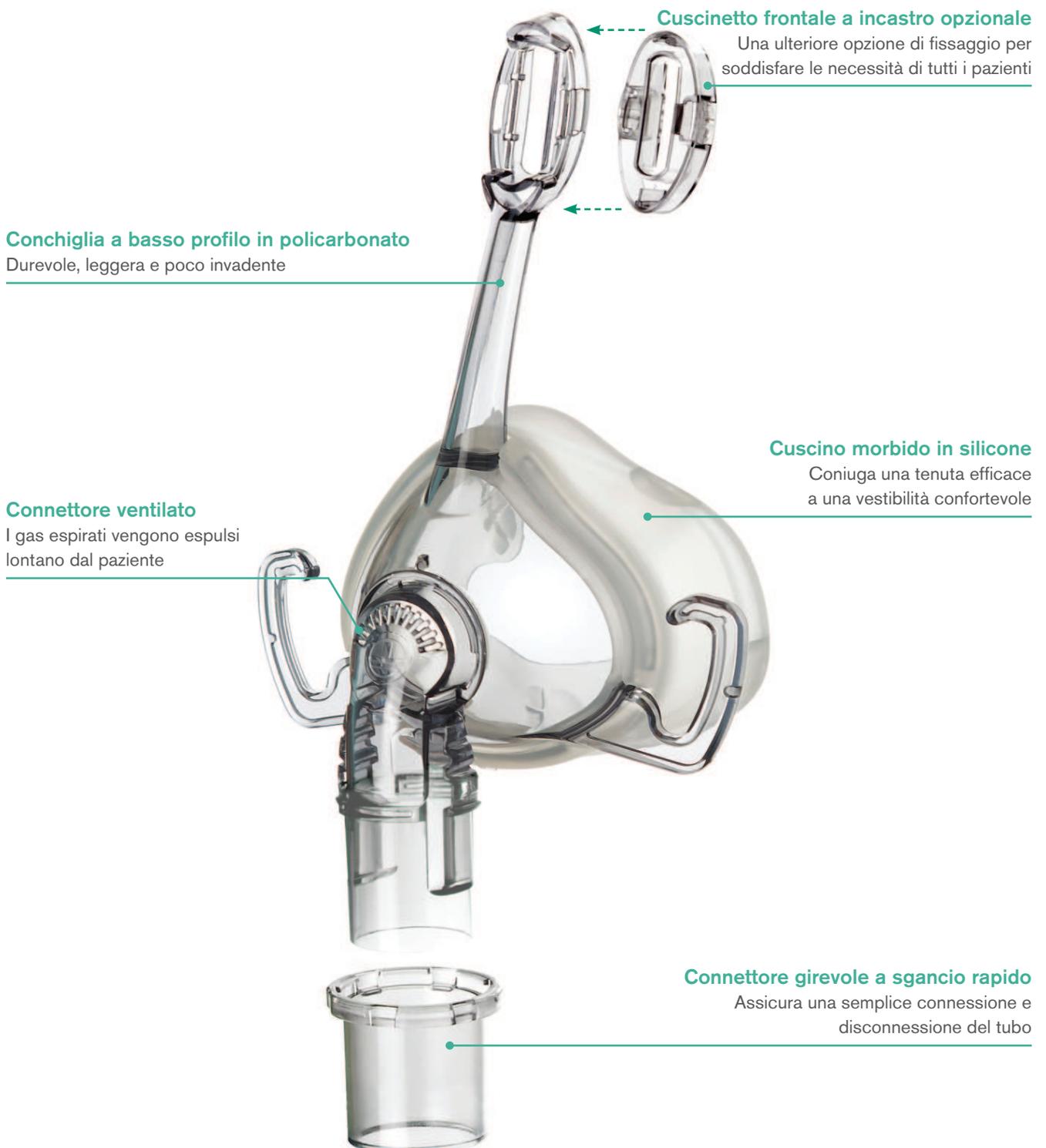



Novus™ maschera nasale per CPAP

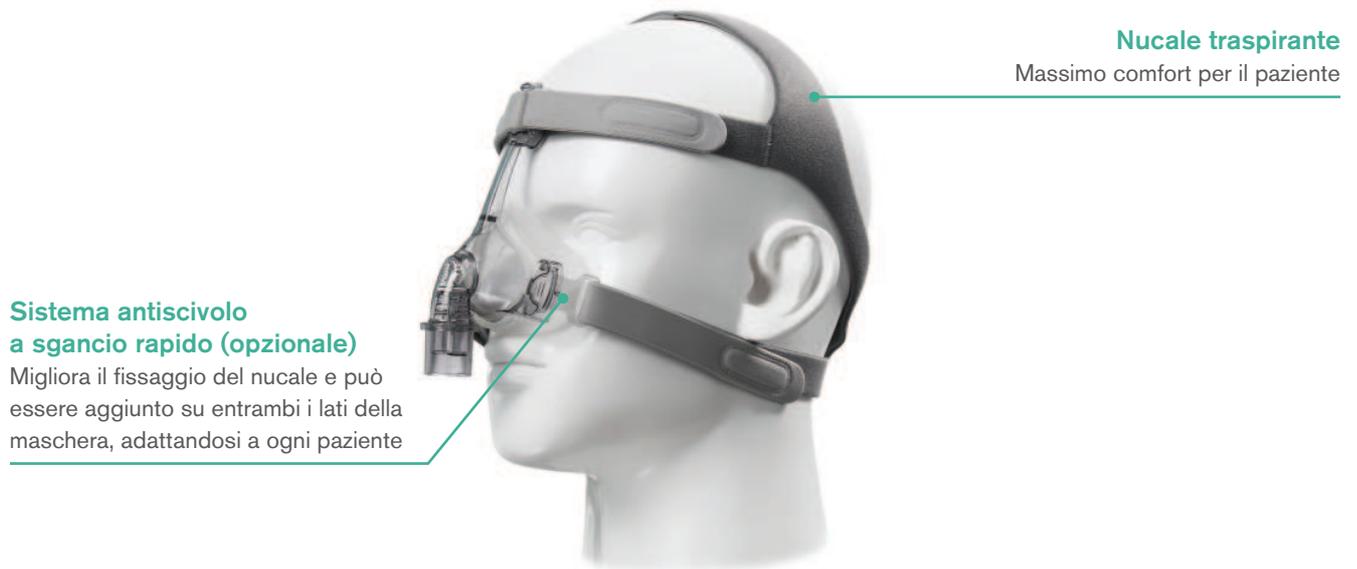

Nucale traspirante

Massimo comfort per il paziente

Sistema antiscivolo a sgancio rapido (opzionale)

Migliora il fissaggio del nucale e può essere aggiunto su entrambi i lati della maschera, adattandosi a ogni paziente

Informazioni per l'ordine

La maschera nasale per CPAP Novus è disponibile in due misure: medium e large.

Codice	Descrizione	Istruzioni per l'Uso (lingue)	Q.tà per scatola
7770000	Novus maschera nasale per CPAP, Large	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano	8
7790000	Novus maschera nasale per CPAP, Medium	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano	8

Accessori

Codice	Descrizione	Q.tà per scatola.
7776000	Nucale maschera Novus (include nucale e clip a sgancio rapido)	20





Fissaggio della maschera

Come ottenere un fissaggio della maschera confortevole e senza perdite.



1. Rimuovere il connettore girevole dalla maschera premendo sulla clip di sgancio rapido



2. Collegare il connettore al circuito del dispositivo.



3. Aprire il nucale e la maschera.



4. Posizionare il cuscinio della maschera sul naso e tenerlo in posizione. Infilare delicatamente il nucale sulla testa assicurandosi che gli strap inferiori si trovino al di sotto delle orecchie



5. Controllare che gli strap non siano attorcigliati e inserire lo strap inferiore rimasto libero nel gancio della maschera



6. Regolare il fissaggio della maschera sganciando gli strap superiori, tirandoli entrambi e riattaccandoli al nucale. La tenuta deve essere ferma ma senza stringere eccessivamente.



7. Completare il fissaggio sganciando gli strap inferiori, tirandoli entrambi e poi riattaccandoli. La tenuta deve essere ferma ma senza stringere eccessivamente.



8. Verificare che il dispositivo CPAP/ bilevel sia funzionante. L'aria fluisce dal circuito al dispositivo. Collegare il connettore girevole, già connesso, al raccordo angolato della maschera.



9. Se necessario risistemare i ganci del nucale per eliminare qualunque perdita dal cuscinio della maschera. **Non stringere eccessivamente la maschera.** Se le perdite persistono sollevare il cuscinio della maschera dal naso, riposizionarlo e riaggiustare gli strap del nucale.



Intersurgical SpA, Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e ISO 14001:2015

Rispetta l'ambiente!
Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente privilegia il fronte/retro.

Il distributore Intersurgical S.p.A. è certificato ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016

IS1.44_IT • Issue 1 09.18