



Umidificatore serie VHB20



Critical Care ▪ Umidificatore



Umidificatore serie VHB20

L'umidificatore serie VHB20 va ad implementare la nostra offerta per l'umidificazione attiva, mettendo a disposizione dei nostri clienti un sistema ideale compatibile con la nostra ampia gamma di circuiti riscaldati e accessori.

L'umidificatore VHB20 offre numerosi vantaggi chiave:

- Due modalità di trattamento preimpostate e personalizzabili
- Monitoraggio e controllo automatici dell'umidità per ottimizzare l'erogazione dei gas e ridurre al minimo la formazione di condensa
- Ampio schermo a colori ad alta risoluzione, idoneo l'uso diurno e notturno
- Gamma completa di allarmi operativi, incluso l'allarme di bassa umidità
- L'umidificatore VHB20 viene fornito pronto all'uso, con sonda di temperatura e adattatore per circuito riscaldato inclusi nella confezione



Display configurabile

Possibilità di scegliere la temperatura da impostare lato camera e lato paziente

Teste di bloccaggio

Semplice montaggio e smontaggio della camera di umidificazione

Ampia gamma di applicazioni

Compatibile con circuiti non riscaldati, riscaldati a linea singola e a doppia linea

Monitor 2.8" TFT a colori

Ampio e chiaro display a colori anti-riflesso e con modalità notturna

Selezione modalità

Modalità AUTO (invasiva, non-invasiva) e Manuale che permette all'utilizzatore di impostare le temperature desiderate

Pannello degli allarmi

Risposta veloce ed intuitiva agli allarmi segnalati

Visualizzazione del tempo di funzionamento

Per monitorare la durata del trattamento in corso



Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
51008701	Umidificatore serie VHB20 (EU1)	1
51006181	Sonda per temperatura e umidità per umidificatore serie VHB20	1



Camere di umidificazione

Offriamo una gamma completa di camere per umidificazione attiva, compatibili con i principali umidificatori utilizzati nei reparti di terapia intensiva. Le tre diverse camere di umidificazione sono compatibili con tutti i circuiti a linea riscaldata, sono dotate di connettori maschi da 22mm e un corpo in policarbonato trasparente per una immediata e accurata del livello del liquido.

- La camera di umidificazione **auto-livellante a doppio galleggiante** può essere utilizzata in svariate terapie di supporto ventilatorio a partire dalla CPAP fino ad una completa ventilazione meccanica, per pazienti di tutte le età e dimensioni corporee. Questa camera di umidificazione garantisce ai medici un livello costante di acqua, essendo automaticamente rimpiazzata da una sacca di riserva. In questo modo il volume comprimibile del sistema di ventilazione non fluttua, ma rimane costante. Di fatto è la camera di umidificazione di elezione per l'uso in tutti i reparti di terapia intensiva, sia neonatali sia adulte.
- La camera di umidificazione **a riempimento manuale** è dotata di una clamp lungo la linea di riempimento che separa la camera dalla sacca di riserva. Richiede un monitoraggio del livello dell'acqua da parte degli operatori sanitari e di aprire la clamp quando è necessario rabboccare il liquido. E' una alternativa economica talvolta utilizzata in applicazioni con una elevata driving pressure (es. nFlow™).
- La camera di umidificazione **a basso volume** e a riempimento manuale è dotata di clamp. Con un volume comprimibile molto basso è ideale per applicazioni come la ventilazione avanzata ad alta frequenza per tutti i tipi di pazienti.



2310000



2320000




2330000

Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
2310000 (S*)	Camera di umidificazione auto-livellante a doppio galleggiante e set per riempimento	30 (30*)
2320000	Camera di umidificazione a riempimento manuale con clamp e set per riempimento	30
2330000	Camera di umidificazione a basso volume, a riempimento manuale con clamp e set per riempimento	30

[Richiesta info](#)

Adattatori elettrici per umidificatore

Una gamma di adattatori elettrici per connettere il circuito per ventilazione riscaldata all'umidificatore.

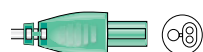

5600000



5601000



5603000



5604000



51006182



5600000



5601000



5603000



5604000



51006182

Codice	Descrizione	Umidificatore	Q.tà/scatola
5600000	Adattatore elettrico per circuiti a singola linea riscaldata con connettore nero	MR850™, serie 7000	1
5601000	Adattatore elettrico per circuiti a doppia linea riscaldata con connettore nero	MR850™, serie 7000	1
5603000	Adattatore elettrico per circuiti a singola linea riscaldata con connettore grigio	MR730™	1
5604000	Adattatore elettrico per circuiti a doppia linea riscaldata con connettore grigio	MR730™	1
51006182	Adattatore elettrico per circuiti a doppia linea riscaldata con connettore grigio-rosso	serie VHB20	1


S Disponibile versione sterile. (S*) Aggiungere una S al codice numerico a 7 cifre per ordinare la versione sterile del prodotto es. 5000000S (la quantità indicata tra parentesi si riferisce al prodotto sterile).

MR850, MR730, MR850, MR500 e MR600 sono marchi registrati Fisher & Paykel Healthcare.



Circuiti per ventilazione per umidificazione attiva a linea riscaldata


I circuiti respiratori sono disponibili a linea riscaldata doppia o singola, completi o meno di camera di umidificazione a riempimento automatico. Tutti i circuiti respiratori per umidificazione attiva Intersurgical sono compatibili con la maggior parte dei sistemi di umidificazione comunemente utilizzati nei reparti di terapia intensiva. Offriamo una ampia gamma di circuiti per ventilazione per umidificazione attiva per pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Consulta la nostra gamma sul sito www.intersurgical.it

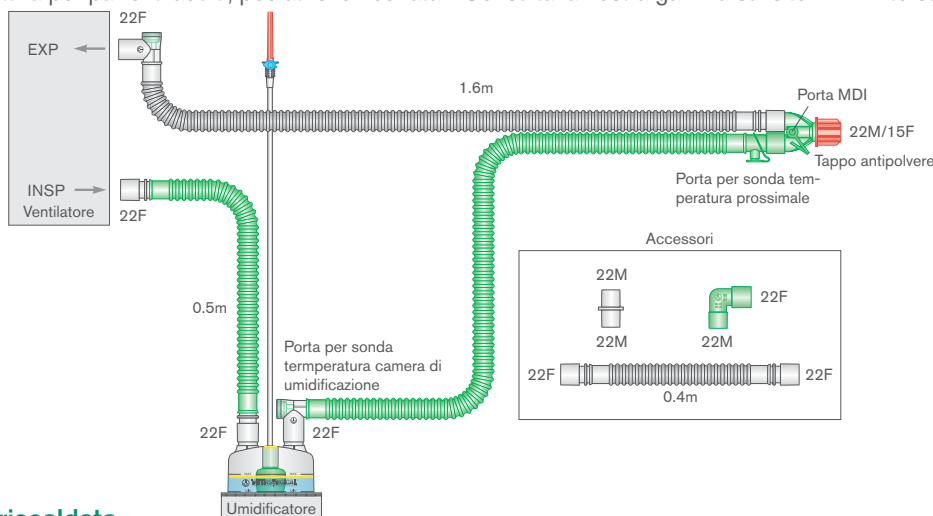

👁 Sistema illustrato

Doppia linea riscaldata

Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
2066310	Circuito per ventilazione permeabile Dri-Therm da 22mm a doppia linea riscaldata e spezzone ≥ 1.6 m	7
2026000 (S*)	Circuito per ventilazione Flextube da 22mm a doppia linea riscaldata e spezzone ≥ 1.6 m	10 (12*)
👁 2026310 (S*)	Circuito per ventilazione Flextube da 22mm a doppia linea riscaldata con camera di umidificazione auto-livellante e spezzoni da 0.4m e 0.5m ≥ 1.6 m	7 (6*)

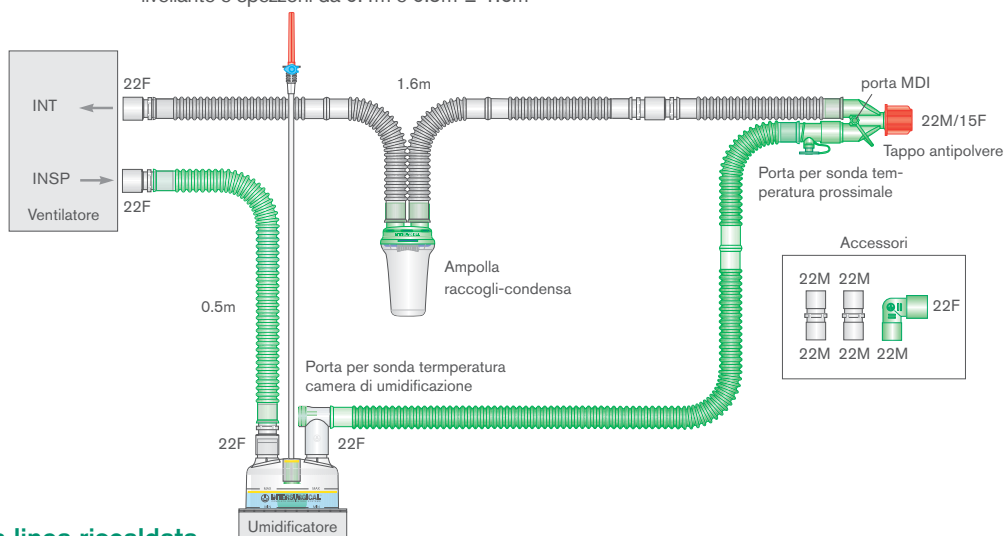

Richiedi info

👁 Sistema illustrato

Singola linea riscaldata

Codice	Descrizione	Q.tà/scatola
2025000	Circuito per ventilazione Flextube da 22mm a singola linea riscaldata, raccogli condensa e spezzone ≥ 1.6 m	10
👁 2025310 (S*)	Circuito per ventilazione Flextube da 22mm a singola linea riscaldata, raccogli condensa, camera di umidificazione auto-livellante e spezzone 0.5m ≥ 1.6 m	7 (5*)

Materiale informativo destinato esclusivamente ad operatori sanitari.

IS1.57_IT ▪ Issue 1.1 04.26



Distribuito da: Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e MDSAP



Ricordati
di riciclare

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Ireland ▪ Italy
Japan ▪ Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA